

Hiroo Yabe M.D.  
2nd Dept .Ophthalmology,TOHO Univ.

手術学会発表製品



### HS-9826 Crocodile Clamp

- クロスアクション・横アプローチの新しいTypeのクランプです。
- 六刃でクランプし、縫合時、5穴より6-0・7-0(丸針)を等間隔に通糸・縫合が出来ます。
- 柄から段差をつけることにより、左眼・右眼でも持ち手を変える必要がありません。
- ミューラー筋短縮術に最適です。
- 太い持ち手、適度な把持力、考え抜かれた形状により、操作性に優れた製品です。



### HS-9821 ビスコカナロストミー針 (34G/36G)



手術学会発表製品

### HS-2708B 改良型前房メインテナー

- HS-2708A 前房メインテナーに固定用の突起をつけることにより、術時の安定性を実現させました。
- 御指導;出田眼科 堀本 先生



### HS-2754 虹彩縫着針

- 虹彩が外傷等により剥離した虹彩を縫着を容易にする事を目的に製作されました。
- 使用例  
→針を剥離反対側の強角膜側よりアプローチ。  
→剥離側強角膜へ針先端を出し、糸の片側を把持し、眼内に戻す。  
→剥離した虹彩を通糸し、再度、強角膜へ出す。
- 手技により連続縫合や多目的に使用できます。
- 緊急外来等を行っている病院等には非常に便利な製品です。
- 10-0ポリプロピレン糸 柄:テフロン製 滅菌済



### HS-9827 真野式 涙小管トレパン

- ⇒初期状態は、先端は丸くブージー状になっており、安全に狭窄部位まで先端を到達させる事が出来ます。
- ⇒狭窄部位確認後、内部の柄(銀色部)を抜く事により、先端の鋭部(トレパン状)の刃の部分が出てきますので、安全に穿孔できます。
- トレパンφ1mm