

# ソフト眼瞼固定器

医療機器届出番号：13B2X10345180100

患者様の目をもっと大事にしたい・・・  
開瞼ではなく瞼を留めるための  
眼科医の新しい右腕




## ソフト開瞼固定器とは

眼科の先生の「患者様の眼をもっと大事にしたい」  
その発想から生まれました。現在の開瞼器の弱点を補う  
ソフトな開瞼器です。開瞼力は手術用ほど強力ではありません。しかし「使用時・使用後において、ストレスが少なく  
使いやすいものはないか、患者様側も安心して診察に望める  
器具はないか」という要望を叶えるための器具です。また、  
お子様にも安全にご使用することができます。

- 本品は眼検査時などの眼瞼を開けた状態を保持するために用います。
- 検査装置画像に睫毛が映り込まないようにします。
- 軽量コンパクト設計、肌にやさしい素材を使用しています。
- 簡単な操作で、着け心地の良いフィット感を提供します。


## 各部の名称

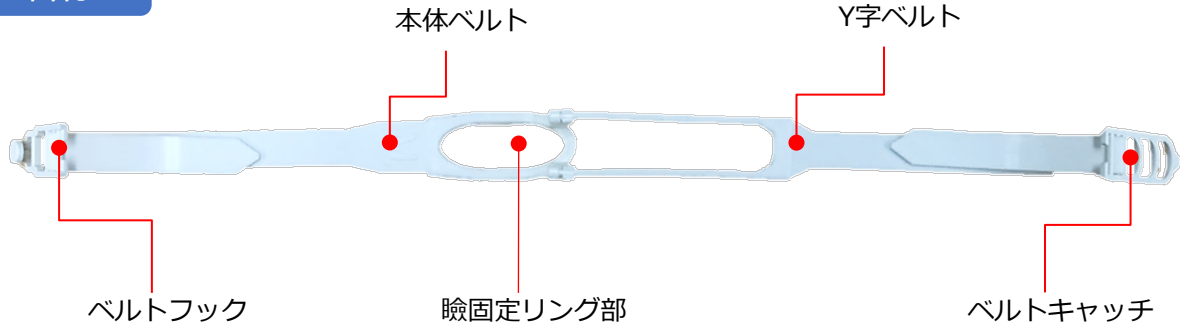


名称	材質	機能
本体ベルト	シリコーンゴム	眼瞼および頭部を固定する
Y字ベルト	シリコーンゴム	本体ベルトと組み合わせ、頭部を固定する
ベルトキャッチ	ポリカーボネート	ベルト長さの調節
ベルトフック	ポリカーボネート	ベルト長さの調節

## 装着の方法


水泳用ゴーグルを着ける要領で装着します。

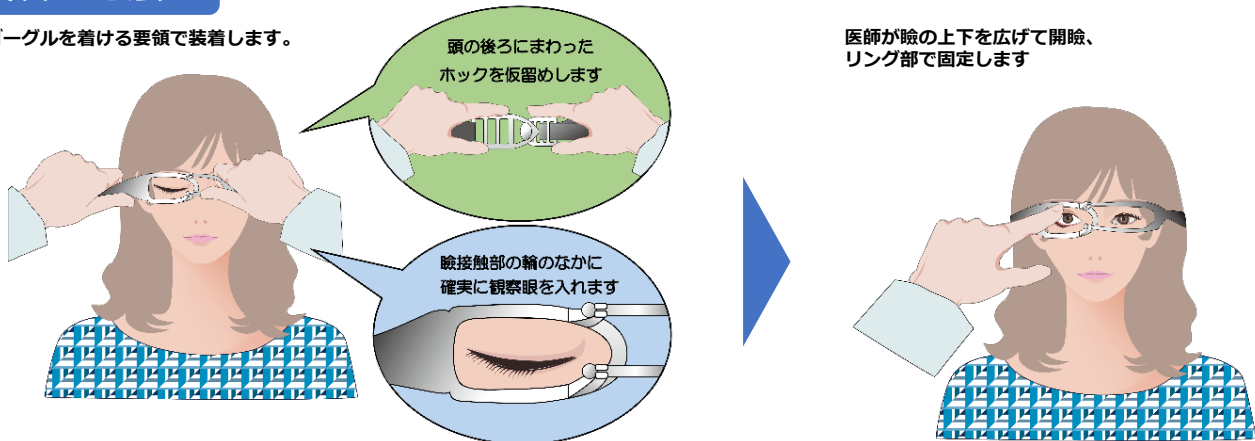

## 装着の例

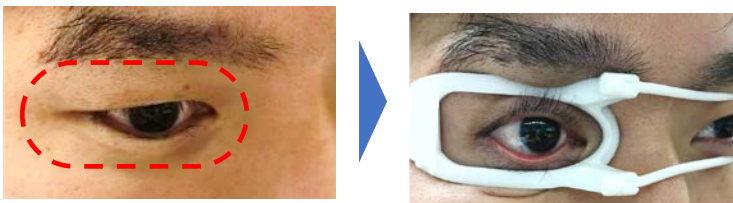

適切なサイズを選択し使用してください。(サイズはS/M/Lがあります)

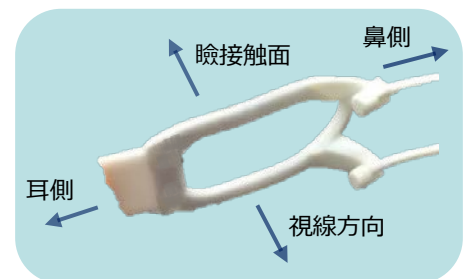

詳細は「ソフト眼瞼固定器」で検索

販売：株式会社はんだや

〒113-0033 東京都文京区本郷3-37-8

TEL. 03-3811-0087

<http://www.handaya.co.jp>

[info@handaya.co.jp](mailto:info@handaya.co.jp)

CenturyArks Co., Ltd.

製造販売元：株式会社センチュリーアークス

〒106-0031 東京都港区西麻布3-13-1

TEL. 03-6804-5752

<https://www.centuryarks.com>

[ca\\_sales@centuryarks.com](mailto:ca_sales@centuryarks.com)